



Jeb kurā vietā
jeb kurā laikā



www.evolu.health

Viegla tīrīšana
un apkalpošana



EVOLU
electronics
feel better ♥



n a n o
A i R

PORTABLE Mesh Nebulizer

ĪPAŠI SMALKAS DAĻIŅAS

Pārnēsājamā membrānas NEBULAIZERS Nano Air.

Portatīvo nebulaizeru darbina straujas ķēdes svārstības, ko rada keramikas pjezoelektriskais efekts. Portatīvā nebulaizera darbības princips ir straujas ķēdes svārstības, kas rada rezonanses keramikas mikroshēmas svārstības, mikrometāla sietiņa straujo svārstīšanos, virza šķidrumu caur metāla sietiņu uz smalkāku sietiņu (3 μm) un ātri izdalās, veidojot daudzu sīku daļiņu, caur ieelpošanas masku/uzdeguni vai sprauslu, lai vadītu pacienta elpošanas sistēmu, lai panāktu inhalācijas terapijas mērķi.



IEPAKOJUMA SATURS:



NEBULAIZERS

2 MASKAS
(bērnu un
pieaugušo)

IEMUTNIS

Pliša maisiņš
nebulaizeram

LIETOTĀJA
rokasgrāmata

Iebūvēts
akumulators
ar mikro USB
kabeli

VIEGLS

Īpaši kluss

iespēja veikt inhalāciju
bērnā gulot



FAMILY
care

Nebulaizera darbības laiks sastāda 10 minūtes, pēc kurām tas automātiski pats atslēgsies. Ja jāturpina lietot, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi.

Pēc pilnas uzlādes, bateriju grupa var nodrošināt strāvu līdz pat **60 minūtēm**

Lūdzu, pārliecinieties, ka medikamentu trauciņā ir pietiekami daudz šķidruma.

Gaistošās eļļas nav atļautas, tās var izraisīt moduļa bojājumus. Ūdeni šķīstošās zāles un fizioloģiskā šķidruma atšķaidīšanas zāles ir atļautas smidzināšanai, bet var izraisīt bronhu spazmu.

Nelietojiet šķidrumu, kas satur esteru, eļļu vai cietas daļiņas, ieskaitot augu ekstraktu ar nogulsniem, kā arī eļļu saturošus medikamentus.